



## Kälte-Sofort-Kompresse

**Schneller Kühleffekt ideal für Sport, Freizeit und unterwegs - für den einmaligen Gebrauch!**

- Einweg-Kühlkompresse für schnelle Hilfe bei Unfällen & Verletzungen ohne offene Wunden
- Soforthilfe bei Prellungen & Verstauchungen
- sekundenschnell gebrauchsfertig
- ideal für zu Hause & unterwegs
- gleichmäßige Kälteabgabe
- Kompresse kann im normalen Hausmüll entsorgt werden

### Hinweis:

Nur zur äußerlichen Anwendung. Nur zum Einmalgebrauch — nicht wieder einfrieren. Zwischen aktivierte Kompresse und Haut immer ein Tuch legen. Nicht den äußeren Beutel beschädigen. Bei Kontakt des Inhalts mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Nicht bei sensorisch beeinträchtigten Patienten verwenden. Die Sofort-Kompresse für Kinder unzugänglich aufbewahren. Anwendung bei Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.

### Anwendungsbeispiele:

- wird innerhalb weniger Sekunden durch Zusammendrücken aktiviert und kühlt zur Erstversorgung
- innenliegende Blase durch Druck zum Platzen bringen - Kompresse kräftig schütteln - in ein Tuch wickeln und anwenden
- die Kälte-Sofort-Kompresse für den Einmalgebrauch wirkt abschwellend und schmerzlindernd unter anderem bei Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen, Schwellungen,
- einsetzbar auch bei Blutergüssen, Insektenstichen und Zahnschmerzen



Kälte-Sofort-Kompresse



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Maße	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Kälte-Sofort-Kompresse	228 x 152 mm		10110	53600105